



CIDEZYME® - Detergente enzimático

Código 2260 (5 litros) y 2258 (1 litro)

Descripción:

El detergente enzimático CIDEZYME® es un detergente enzimático líquido concentrado. El detergente enzimático está especialmente formulado para la limpieza manual de instrumental médico quirúrgico o en máquina automática para limpieza de instrumentos endoscópicos flexibles antes de la desinfección de alto nivel o de esterilización del equipo.

El detergente proporciona un proceso de limpieza de un solo paso, donde la enzima degrada materia orgánica como sangre, heces o moco, mientras el surfactante retira el restante de materia del dispositivo.

El producto es efectivo preparando 8 mililitros por cada litro de agua a temperatura ambiente. Para equipo sucio, dejar en inmersión a partir de un (1) minuto inmediatamente después del procedimiento quirúrgico. Para equipo sucio con materia orgánica que se haya secado, se recomienda doblar la dosis del detergente enzimático.

Precauciones, advertencias, contraindicaciones y reacciones adversas

Evite el contacto con piel y ojos: para ello, **utilice protección ocular y guantes de goma**. En caso de contacto limpiar con abundante agua y acudir al médico si se produce irritación. Puede ser nocivo si se ingiere. Si esto ocurriera, buscar auxilio médico. **Úselo en áreas ventiladas.**

Código del producto:

2260 (5 litros) y 2258 (1 litro)

Presentación:

Unitaria

Vencimiento:

24 meses

Almacenamiento:

Almacene a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

Evite temperaturas mayores a 40°C.

Nota: consulte siempre el instructivo de uso, para recomendaciones más detalladas.